


6

SCHRITTE ANLEITUNG ZUM ANTIGEN-SELBSTTEST

EXTRAKTIONSPUFFERRÖHRCHEN

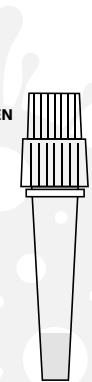

EINWEGTUPFER



TESTKASSETTE

1

- Tupfer ca. 2,5 Zentimeter in ein Nasenloch einführen
- Das Stäbchen 5 Mal drehen, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
- Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

2

- Rörchen mit Pufferlösung aufschrauben, ohne es zu drücken
- Das Stäbchen einführen und 30 Sekunden umrühren
- Rörchen zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens 5 Mal drehen
- Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Rörchen spritzt!

3

- Stäbchen entnehmen und dabei Rörchen zusammendrücken
- Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen
- Rörchen wirbeln und schütteln

4

- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
- Kappe von der Tropferspitze abdrehen
- Rörchen vorsichtig zusammendrücken und 4 Tropfen auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)

5

- 15 Minuten warten
- Das Ergebnis ablesen

6

Ergebnisinterpretation

- NEGATIV
- POSITIV
- UNGÜLTIG